

SISTEMA ADVANCED

COD: T-CO-01 / VE:06 / FE: 2018-10-29



Ficha Técnica

NOMBRE GENÉRICO: SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR

NOMBRE COMERCIAL: ADVANCED

REFERENCIA: 109



FABRICANTE: Mediimplantes SA.

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

Ti 6Al 4V ELI (Extra low interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications- UNS R56401, ASTM F136-02.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

El sistema ADVANCED está diseñado para realizar una fijación a través de los pedículos con el fin de lograr inmovilización y estabilización de segmentos espinales, cuenta con implantes de diferentes tamaños para ajustarse a la zona de la columna en donde vayan a ser implantados.

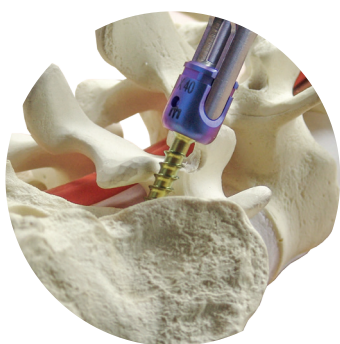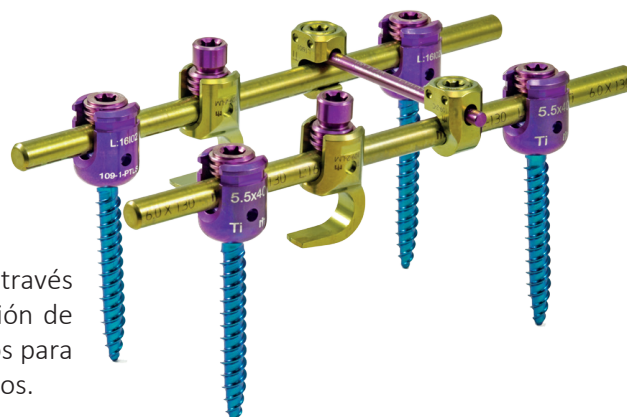

ADVANCED, es un sistema compuesto por Tornillos Monoaxiales, Poliaxiales, Biaxiales y de Reducción, Ganchos, Ganchos de Reducción, Ganchos Conectores Transversos y Barras Longitudinales fabricados en aleación de Titanio (Ti6Al4V ELI, ASTM F-136).

Los Tornillos Poliaxiales, son de fijación con rosca tipo cuadrada que permite un nivel de apriete de rango 9.0Nm a 10.2Nm, para mayor estabilidad. El bloqueador garantiza el nivel de apriete de diseño, ya sea con el uso del limitador de torque o por medio del sistema de fusible mecánico del bloqueador.

Los conectores transversos ajustables, esta diseñados para variar su longitud mediante el deslizamiento de sus dos Barras (Macho y Hembra) y permiten una poliaxialidad de sus ganchos en +/- 20°.

ESTUDIOS Y ENSAYOS

- Standard Test Methods for Spinal Implant Constructs in a Vertebrectomy Model- ASTM F1717-04
- Caracterización Mecánica y metalúrgica ASTM E8.

CERTIFICADOS

- Registro Sanitario N° INVIMA 2018DM-0000663-R1
- Certificado ISO 9001 / Certificado ISO 13485

INDICACIONES

Sistema de implantes de columna utilizados en pacientes que presentan Dolor de Espalda Bajo, Crónico, Severo causado por enfermedad generativa del disco. También en pacientes con Microinestabilidad. Para el tratamiento de patologías como:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Malformaciones | - Cifoescoliosis toracolumbar |
| - Tumores e infecciones | - Espondilolistesis |
| - Espóndilo artrosis | - Inestabilidad degenerativa y postraumática |
| - Escoliosis toraco lumbar y lumbar | - Discopatias degenerativas |





Ficha Técnica

TORNILLOS POLIAXIALES


- Rosca tipo Autoroscante y Auto perforante.
- Cuerpo con rosca de doble entrada que brinda facilidad para introducir el tornillo en el pedículo.
- Diámetro exterior constante con punta cónica y roma
- Diámetros de 4.0 a 8.0mm
- Longitudes de 25 a 120mm
- Sistema de Bloqueo sencillo, rosca cuadrada, apriete a 10 N-m
- Ángulo de Poliaxialidad desde 52° (-26° +26°) hasta 82° (-41° +41°), Ver Tabla.
- Compatible con Barras de 6.0mm de diámetro



Referencia	Cuerpo Tornillo	Poliaxialidad		Promedio	Rango
		Angulo Medial	Angulo Total		
109-1-P Tornillos Poliaxiales	Minitorácico	41.0	82.0	68.67	Desde 52 hasta 82
	Torácico	40.0	80.0		
	Toracolumbar	36.0	72.0		
	Lumbar	33.0	66.0		
	Sacrolumbar	30.0	60.0		
109-1-PS Tornillos Poliaxiales Speed	Sacro	26.0	52.0	58.6	Desde 40 hasta 74
	Torácico Alto	37.0	74.0		
	Minitorácico	34.0	68.0		
	Torácico	32.0	64.0		
	Toracolumbar	30.0	60.0		
	Lumbar	28.0	56.0		
	Sacrolumbar	24.0	48.0		
	Sacro	20.0	40.0		


TORNILLOS POLIAXIALES DE REDUCCIÓN

- Las mismas características de un Tornillo Poliaxial
- Extensiones removibles durante el procedimiento quirúrgico
- Compatible con Barras de 6.0mm de diámetro

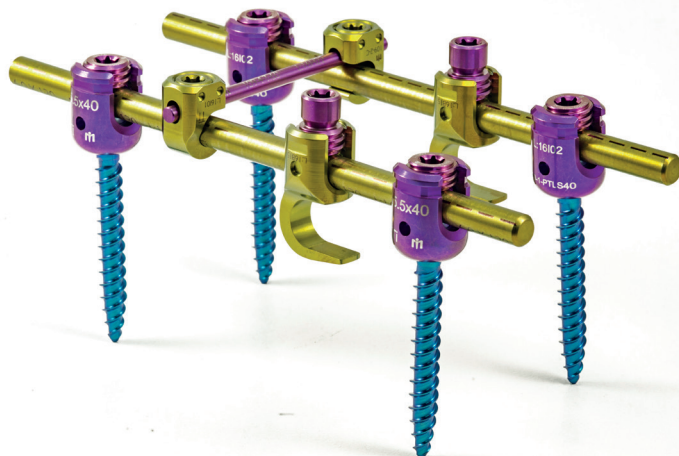

TORNILLOS MONOAXIALES

- Rosca tipo Autoroscante y Auto perforante.
- Cuerpo con rosca de doble entrada que brinda facilidad para introducir el tornillo en el pedículo.
- Diámetro exterior constante con punta cónica y roma
- Diámetros de 4.0 a 8.0mm
- Longitudes de 25 a 120mm
- Sistema de Bloqueo sencillo, rosca cuadrada, apriete a 10 N-m
- Compatible con Barras de 6.0mm de diámetro

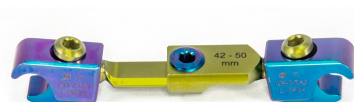


GANCHOS

- Gancho Laminar Torácico, corto y de Reducción.
- Gancho Laminar Mediano, corto y de Reducción.
- Gancho Pedicular, corto y de Reducción.
- Conectores Transversos Estándar y Ajustables
- Conectores de Barras

BARRA LONGITUDINAL

- Diámetro 6.0mm.
- Rectas, para ser moldeadas en quirófano, y precurvadas.
- Líneas indicadoras que permiten orientar el plano de moldeo.
- Longitudes de 30 a 510 mm.

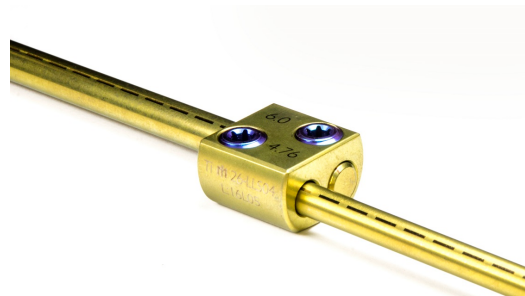



Ficha Técnica

PRESENTACION Y EMPAQUE

Los implantes del Sistema ADVANCED son provistos no esterilizados, empacados individualmente e identificados mediante gravado con láser sobre cada implante con: código de producto, número de lote, logo MEDIIMPLANTES, símbolo del material (Ti) y la dimensión específica de uso. Esta marcación es permanente y permite hacer trazabilidad del producto aun después de implantado.

- Empaque Primario: bolsa de papel grado médico para productos a ser esterilizados y film poliéster laminado con cinta de seguridad. Esta provista de indicadores químicos no tóxicos, aptos para métodos comerciales de esterilización posibilitando el monitoreo interno de los parámetros de esterilización.
- Empaque secundario: Organizadores tipo gradilla los cuales protegen los implantes de daños mecánicos que se pueden llegar a producir en el traslado de material a otros lugares.
- Empaque terciario: Cajas en aluminio con mecanismo de seguridad que contienen todos los organizadores para poner a disposición.

ALMACENAMIENTO Y DISPONIBILIDAD

El implante debe ser almacenado y conservado en un lugar a temperatura ambiente y libre de polvo; manipulado de acuerdo a los métodos asépticos aplicables, para evitar la contaminación.
Disponibilidad inmediata.

REFERENCIAS DISPONIBLES

El Listado Anexo contiene las referencias de implantes disponibles.

REFERENCIAS DISPONIBLES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
109-1-B	Tornillo de Bloqueo	109-2-P20	Tornillo Gancho Pedicular x 20
109-1-BF	Tornillo de Bloqueo Fusible	109-2-P25	Tornillo Gancho Pedicular x 25
109-1-BL30	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x30	109-2-P30	Tornillo Gancho Pedicular x 30
109-1-BL35	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x35	109-2-P35	Tornillo Gancho Pedicular x 35
109-1-BL40	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x40	109-2-TA1	Conector Transverso Ajustable 1
109-1-BL45	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x45	109-2-TA2	Conector Transverso Ajustable 2
109-1-BL50	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x50	109-2-TA3	Conector Transverso Ajustable 3
109-1-BL55	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x55	109-2-TA4	Conector Transverso Ajustable 4
109-1-BL60	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x60	109-2-TA5	Conector Transverso Ajustable 5
109-1-BMT25	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x25mm	109-2-TA6	Conector Transverso Ajustable 6
109-1-BMT30	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x30mm	109-2-TA7	Conector Transverso Ajustable 7
109-1-BMT35	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x35mm	109-2-TA8	Conector Transverso Ajustable 8
109-1-BMT40	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x40mm	109-4-EL	Barra de Extensión en L
109-1-BMT45	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x45mm	109-4-L40	Barra Longitudinal 6,0 X 40
109-1-BMT50	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x50mm	109-4-L50	Barra Longitudinal 6,0 X 50
109-1-BS30	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x30	109-4-L60	Barra Longitudinal 6,0 X 60
109-1-BS35	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x35	109-4-L70	Barra Longitudinal 6,0 X 70
109-1-BS40	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x40	109-4-L80	Barra Longitudinal 6,0 X 80
109-1-BS45	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x45	109-4-L90	Barra Longitudinal 6,0 X 90

SISTEMA ADVANCED

COD: T-CO-01 / VE:06 / FE: 2018-10-29



REFERENCIAS DISPONIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
109-1-BSL30	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x30	109-4-L100	Barra Longitudinal 6,0 X 100
109-1-BSL35	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x35	109-4-L110	Barra Longitudinal 6,0 X 110
109-1-BSL40	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x40	109-4-L120	Barra Longitudinal 6,0 X 120
109-1-BSL45	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x45	109-4-L130	Barra Longitudinal 6,0 X 130
109-1-BSL50	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x50	109-4-L140	Barra Longitudinal 6,0 X 140
109-1-BSL55	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x55	109-4-L150	Barra Longitudinal 6,0 X 150
109-1-BT30	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x30	109-4-L165	Barra Longitudinal 6,0 X 165
109-1-BT35	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x35	109-4-L180	Barra Longitudinal 6,0 X 180
109-1-BT40	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x40	109-4-L210	Barra Longitudinal 6,0 X 210
109-1-BT45	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x45	109-4-L300	Barra Longitudinal 6,0 X 300
109-1-BT50	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x50	109-4-L480	Barra Longitudinal 6,0 X 480
109-1-BTL30	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x30mm	109-4-LE260	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 260
109-1-BTL35	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x35mm	109-4-LE300	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 300
109-1-BTL40	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x40mm	109-4-LE340	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 340
109-1-BTL45	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x45mm	109-4-LE380	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 380
109-1-BTL50	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x50mm	109-4-LE420	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 420
109-1-BTL55	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x55mm	109-4-LE450	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 450
109-1-BTL60	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x60mm	109-4-LE460	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 460
109-1-BTL65	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x65mm	109-4-LE480	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 480
109-1-ML30	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 30	109-4-LL500	Barra Longitudinal Luque por 500
109-1-ML35	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 35	109-4-AL1	Amarra Barra Luque L1
109-1-ML40	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 40	109-4-AL2	Amarra Barra Luque L2
109-1-ML45	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 45	109-4-AL3	Amarra Barra Luque L3
109-1-ML50	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 50	109-4-T40	Barra Transversa X 40
109-1-ML55	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 55	109-4-T60	Barra Transversa X 60
109-1-MLR30	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 30	109-4-T80	Barra Transversa X 80
109-1-MLR35	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 35	109-4-T100	Barra Transversa X 100
109-1-MLR40	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 40	109-1-MMTS30	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x30
109-1-MLR45	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 45	109-1-MMTS35	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x35
109-1-MLR50	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 50	109-1-MMTS40	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x40
109-1-MLR55	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 55	109-1-MMTS45	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x45
109-1-MS30	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 30	109-1-MMTRS30	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x30
109-1-MS35	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 35	109-1-MMTRS35	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x35
109-1-MS40	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 40	109-1-MMTRS40	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x40
109-1-MSL25	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 25	109-1-MMTRS45	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x45
109-1-MSL30	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 30	109-1-MTS30	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 30
109-1-MSL35	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 35	109-1-MTS35	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 35
109-1-MSL40	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 40	109-1-MTS40	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 40
109-1-MSL45	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 45	109-1-MTS45	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 45
109-1-MSL50	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 50	109-1-MTRS30	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 30
109-1-MSL55	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 55	109-1-MTRS35	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 35
109-1-MSR30	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción 7.0 x 30	109-1-MTRS40	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 40
109-1-MSR35	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción 7.0 x 35	109-1-MTRS45	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 45
109-1-MT30	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 30	109-1-MTLS35	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x35
109-1-MT35	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 35	109-1-MTLS40	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x40
109-1-MT40	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 40	109-1-MTLS45	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x45
109-1-MT45	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 45	109-1-MTLS50	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x50
109-1-MTR30	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 30	109-1-MTLRS35	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x35
109-1-MTR35	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 35	109-1-MTLRS40	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x40
109-1-MTR40	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 40	109-1-MTLRS45	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x45
109-1-MSI30	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x30	109-1-MTLRS50	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x50
109-1-MSI35	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x35	109-1-MLS30	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 30

SISTEMA ADVANCED

COD: T-CO-01 / VE:06 / FE: 2018-10-29



REFERENCIAS DISPONIBLES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
109-1-MSI40	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x40	109-1-MLS35	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 35
109-1-MSI45	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x45	109-1-MLS40	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 40
109-1-MSI50	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x50	109-1-MLS45	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 45
109-1-MSI55	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x55	109-1-MLS50	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 50
109-1-MSIR35	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x35	109-1-MLS55	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 55
109-1-MSIR40	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x40	109-1-MLRS30	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 30
109-1-MSIR45	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x45	109-1-MLRS35	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 35
109-1-MSIR50	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x50	109-1-MLRS40	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 40
109-1-MSIR55	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x55	109-1-MLRS45	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 45
109-1-PL30	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x30	109-1-MLRS50	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 50
109-1-PL35	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x35	109-1-MLRS55	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 55
109-1-PL40	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x40	109-1-MSLS25	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 25
109-1-PL45	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x45	109-1-MSLS30	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 30
109-1-PL50	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x50	109-1-MSLS35	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 35
109-1-PL55	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x55	109-1-MSLS40	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 40
109-1-PL60	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x60	109-1-MSLS45	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 45
109-1-PLR30	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x30	109-1-MSLS50	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 50
109-1-PLR35	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x35	109-1-MSLS55	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 55
109-1-PLR40	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x40	109-1-MSLRS25	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 25
109-1-PLR45	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x45	109-1-MSLRS30	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 30
109-1-PLR50	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x50	109-1-MSLRS35	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 35
109-1-PMT25	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x25	109-1-MSLRS40	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 40
109-1-PMT30	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x30	109-1-MSLRS45	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 45
109-1-PMT35	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x35	109-1-MSLRS50	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 50
109-1-PMT40	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x40	109-1-MSLRS55	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 55
109-1-PMT45	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x45	109-1-MSS30	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 30
109-1-PMT50	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x50	109-1-MSS35	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 35
109-1-PMTR30	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 30	109-1-MSS40	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 40
109-1-PMTR35	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 35	109-1-MSRS30	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 30
109-1-PMTR40	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 40	109-1-MSRS35	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 35
109-1-PMTR45	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 45	109-1-MSRS40	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 40
109-1-PMTR50	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 50	109-1-PMTS25	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x25
109-1-PS30	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x30	109-1-PMTS30	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x30
109-1-PS35	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x35	109-1-PMTS35	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x35
109-1-PS40	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x40	109-1-PMTS40	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x40
109-1-PS45	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x45	109-1-PMTS45	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x45
109-1-PS70	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x70	109-1-PMTS50	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x50
109-1-PS80	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x80	109-1-PMTRS30	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x30
109-1-PS110	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x110	109-1-PMTRS35	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x35
109-1-PS120	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x120	109-1-PMTRS40	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x40
109-1-PSL25	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 25	109-1-PMTRS45	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x45
109-1-PSL30	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 30	109-1-PMTRS50	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x50
109-1-PSL35	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 35	109-1-PTS30	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x30
109-1-PSL40	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 40	109-1-PTS35	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x35
109-1-PSL45	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 45	109-1-PTS40	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x40
109-1-PSL50	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 50	109-1-PTS45	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x45
109-1-PSL55	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 55	109-1-PTRS30	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x30
109-1-PSLR25	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 25	109-1-PTRS35	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x35
109-1-PSLR30	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 30	109-1-PTRS40	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x40
109-1-PSLR35	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 35	109-1-PTRS45	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x45
109-1-PSLR40	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 40	109-1-PTLS30	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x30
109-1-PSLR45	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 45	109-1-PTLS35	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x35

SISTEMA ADVANCED

COD: T-CO-01 / VE:06 / FE: 2018-10-29



REFERENCIAS DISPONIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
109-1-PSLR50	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 50	109-1-PTLS40	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x40
109-1-PSLR55	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 55	109-1-PTLS45	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x45
109-1-PSR35	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x35	109-1-PTLS50	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x50
109-1-PSR40	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x40	109-1-PTLS55	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x55
109-1-PSR45	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x45	109-1-PTLS60	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x60
109-1-PT30	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x30	109-1-PTLS65	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x65
109-1-PT35	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x35	109-1-PTLRS35	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x35
109-1-PT40	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x40	109-1-PTLRS40	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x40
109-1-PT45	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0 x 45	109-1-PTLRS45	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x45
109-1-PT50	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0 x 50	109-1-PTLRS50	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x50
109-1-PTL30	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x30	109-1-PLS30	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x30
109-1-PTL35	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x35	109-1-PLS35	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x35
109-1-PTL40	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x40	109-1-PLS40	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x40
109-1-PTL45	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x45	109-1-PLS45	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x45
109-1-PTL50	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x50	109-1-PLS50	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x50
109-1-PTL55	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x55	109-1-PLS55	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x55
109-1-PTL60	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x60	109-1-PLRS30	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x30
109-1-PTL65	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x65	109-1-PLRS35	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x35
109-1-PTLR35	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x35	109-1-PLRS40	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x40
109-1-PTLR40	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x40	109-1-PLRS45	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x45
109-1-PTLR45	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x45	109-1-PLRS50	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x50
109-1-PTLR50	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x50	109-1-PSLS25	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 25
109-1-PTR30	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x30	109-1-PSLS30	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 30
109-1-PTR35	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x35	109-1-PSLS35	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 35
109-1-PTR40	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x40	109-1-PSLS40	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 40
109-1-PTR45	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x45	109-1-PSLS45	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 45
109-1-PTR50	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x50	109-1-PSLS50	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 50
109-1-PSI30	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x30	109-1-PSLS55	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 55
109-1-PSI35	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x35	109-1-PSLRS25	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 25
109-1-PSI40	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x40	109-1-PSLRS30	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 30
109-1-PSI45	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x45	109-1-PSLRS35	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 35
109-1-PSI50	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x50	109-1-PSLRS40	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 40
109-1-PSI55	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x55	109-1-PSLRS45	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 45
109-1-PSIR35	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x35	109-1-PSLRS50	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 50
109-1-PSIR40	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x40	109-1-PSLRS55	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 55
109-1-PSIR45	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x45	109-1-PSS30	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x30
109-1-PSIR50	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x50	109-1-PSS35	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x35
109-1-PSIR55	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x55	109-1-PSS40	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x40
109-2-C	Gancho Conector	109-1-PSS45	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x45
109-2-CC	Gancho Conector Cadena	109-1-PSRS30	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x30
109-2-CL	Conector Barra en L	109-1-PSRS35	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x35
109-2-CP	Gancho Conector Pequeño	109-1-PSRS40	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x40
109-2-LM	Gancho Laminar Mediano	109-1-PSRS45	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x45
109-2-LMR	Gancho Laminar Mediano de Reducción	109-1-CT30	Tornillo Canulado Torácico 5.0x30
109-2-LT	Gancho Laminar Torácico	109-1-CT35	Tornillo Canulado Torácico 5.0x35
109-2-LTR	Gancho Laminar Torácico de Reducción	109-1-CT40	Tornillo Canulado Torácico 5.0x40
109-2-P	Gancho Pedicular	109-1-CT45	Tornillo Canulado Torácico 5.0x45
109-2-PR	Gancho Pedicular de Reducción	109-1-CTL30	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x30
109-2-P14	Tornillo Gancho Pedicular x 14	109-1-CTL35	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x35
109-2-P16	Tornillo Gancho Pedicular x 16	109-1-CTL40	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x40
109-2-P18	Tornillo Gancho Pedicular x 18	109-1-CTL45	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x45
109-1-CSL40	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 40	109-1-CTL50	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x50

SISTEMA ADVANCED

COD: T-CO-01 / VE:06 / FE: 2018-10-29



REFERENCIAS DISPONIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
109-1-CSL45	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 45	109-1-CL30	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x30
109-1-MTA20	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x20	109-1-CL35	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x35
109-1-MTA25	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x25	109-1-CL40	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x40
109-1-MTA30	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x30	109-1-CL45	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x45
109-1-MTA35	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x35	109-1-CL50	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x50
109-1-MTA40	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x40	109-1-CL55	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x55
109-1-MTA45	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x45	109-1-CSL25	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 25
109-1-MTA50	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x50	109-1-CSL30	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 30
109-1-MTA55	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x55	109-1-CSL35	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 35
109-1-MTA60	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x60	109-1-CSL50	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 50
109-1-MTA65	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x65	109-1-CSL55	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 55
109-1-MTAR20	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x20	109-4-LC35	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 35
109-1-MTAR25	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x25	109-4-LC40	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 40
109-1-MTAR30	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x30	109-4-LC45	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 45
109-1-MTAR35	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x35	109-4-LC50	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 50
109-1-MTAR40	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x40	109-4-LC55	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 55
109-1-MTAR45	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x45	109-4-LC60	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 60
109-1-MTAR50	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x50	109-4-LC65	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 65
109-1-MTAR55	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x55	109-4-LC70	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 70
109-1-MTAR60	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x60	109-4-LC75	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 75
109-1-MTAR65	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x65	109-4-LC80	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 80
109-1-PTA20	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x20	109-4-LC85	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 85
109-1-PTA25	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x25	109-4-LC90	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 90
109-1-PTA30	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x30	109-4-LC95	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 95
109-1-PTA35	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x35	109-4-LC100	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 100
109-1-PTA40	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x40	109-1-MTARS30	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x30
109-1-PTA45	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x45	109-1-MTARS35	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x35
109-1-PTA50	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x50	109-1-MTARS40	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x40
109-1-PTA55	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x55	109-1-MTARS45	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x45
109-1-PTA60	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x60	109-1-MTARS50	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x50
109-1-PTA65	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x65	109-1-MTARS55	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x55
109-1-PTAR20	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x20	109-1-MTARS60	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x60
109-1-PTAR25	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x25	109-1-MTARS65	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x65
109-1-PTAR30	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x30	109-1-PTAS20	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x20
109-1-PTAR35	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x35	109-1-PTAS25	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x25
109-1-PTAR40	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x40	109-1-PTAS30	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x30
109-1-PTAR45	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x45	109-1-PTAS35	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x35
109-1-PTAR50	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x50	109-1-PTAS40	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x40
109-1-PTAR55	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x55	109-1-PTAS45	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x45
109-1-PTAR60	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x60	109-1-PTAS50	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x50
109-1-PTAR65	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x65	109-1-PTAS55	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x55
109-1-MTAS20	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x20	109-1-PTAS60	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x60
109-1-MTAS25	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x25	109-1-PTAS65	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x65
109-1-MTAS30	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x30	109-1-PTARS20	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x20
109-1-MTAS35	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x35	109-1-PTARS25	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x25
109-1-MTAS40	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x40	109-1-PTARS30	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x30
109-1-MTAS45	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x45	109-1-PTARS35	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x35
109-1-MTAS50	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x50	109-1-PTARS40	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x40
109-1-MTAS55	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x55	109-1-PTARS45	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x45
109-1-MTAS60	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x60	109-1-PTARS50	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x50
109-1-MTAS65	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x65	109-1-PTARS55	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x55
109-1-MTARS20	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x20	109-1-PTARS60	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x60
109-1-MTARS25	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x25	109-1-PTARS65	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x65

SISTEMA ADVANCED

COD: T-CO-01 / VE:06 / FE: 2018-10-29



REFERENCIAS DISPONIBLES			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
26-A01	Conector Axial 6.0 - 6.0	26-AS01	Conector Axial Sencillo 6.0 - 6.0
26-A02	Conector Axial 6.0 - 5.5	26-AS02	Conector Axial Sencillo 6.0 - 5.5
26-A03	Conector Axial 6.0 - 5.0	26-AS03	Conector Axial Sencillo 6.0 - 5.0
26-A04	Conector Axial 6.0 - 4.76	26-AS04	Conector Axial Sencillo 6.0 - 4.76
26-A05	Conector Axial 6.0 - 3.5	26-AS05	Conector Axial Sencillo 6.0 - 3.5
26-A06	Conector Axial 5.5 - 5.5	26-AS06	Conector Axial Sencillo 5.5 - 5.5
26-A07	Conector Axial 5.5 - 5.0	26-AS07	Conector Axial Sencillo 5.5 - 5.0
26-A08	Conector Axial 5.5 - 4.76	26-AS08	Conector Axial Sencillo 5.5 - 4.76
26-A09	Conector Axial 5.5 - 3.5	26-AS09	Conector Axial Sencillo 5.5 - 3.5
26-A10	Conector Axial 5.0 - 5.0	26-AS10	Conector Axial Sencillo 5.0 - 5.0
26-A11	Conector Axial 5.0 - 4.76	26-AS11	Conector Axial Sencillo 5.0 - 4.76
26-A12	Conector Axial 5.0 - 3.5	26-AS12	Conector Axial Sencillo 5.0 - 3.5
26-A13	Conector Axial 4.76 - 4.76	26-AS13	Conector Axial Sencillo 4.76 - 4.76
26-A14	Conector Axial 4.76 - 3.5	26-AS14	Conector Axial Sencillo 4.76 - 3.5
26-A15	Conector Axial 3.5 - 3.5	26-AS15	Conector Axial Sencillo 3.5 - 3.5
26-LL01	Conector Lado a Lado 6.0 - 6.0	26-LLS01	Conector Lado a Lado Sencillo 6.0 - 6.0
26-LL02	Conector Lado a Lado 6.0 - 5.5	26-LLS02	Conector Lado a Lado Sencillo 6.0 - 5.5
26-LL03	Conector Lado a Lado 6.0 - 5.0	26-LLS03	Conector Lado a Lado Sencillo 6.0 - 5.0
26-LL04	Conector Lado a Lado 6.0 - 4.76	26-LLS04	Conector Lado a Lado Sencillo 6.0 - 4.76
26-LL05	Conector Lado a Lado 6.0 - 3.5	26-LLS05	Conector Lado a Lado Sencillo 6.0 - 3.5
26-LL06	Conector Lado a Lado 5.5 - 5.5	26-LLS06	Conector Lado a Lado Sencillo 5.5 - 5.5
26-LL07	Conector Lado a Lado 5.5 - 5.0	26-LLS07	Conector Lado a Lado Sencillo 5.5 - 5.0
26-LL08	Conector Lado a Lado 5.5 - 4.76	26-LLS08	Conector Lado a Lado Sencillo 5.5 - 4.76
26-LL09	Conector Lado a Lado 5.5 - 3.5	26-LLS09	Conector Lado a Lado Sencillo 5.5 - 3.5
26-LL10	Conector Lado a Lado 5.0 - 5.0	26-LLS10	Conector Lado a Lado Sencillo 5.0 - 5.0
26-LL11	Conector Lado a Lado 5.0 - 4.76	26-LLS11	Conector Lado a Lado Sencillo 5.0 - 4.76
26-LL12	Conector Lado a Lado 5.0 - 3.5	26-LLS12	Conector Lado a Lado Sencillo 5.0 - 3.5
26-LL13	Conector Lado a Lado 4.76 - 4.76	26-LLS13	Conector Lado a Lado Sencillo 4.76 - 4.76
26-LL14	Conector Lado a Lado 4.76 - 3.5	26-LLS14	Conector Lado a Lado Sencillo 4.76 - 3.5
26-LL15	Conector Lado a Lado 3.5 - 3.5	26-LLS15	Conector Lado a Lado Sencillo 3.5 - 3.5
26-B01	Bloqueador 1	26-B02	Bloqueador 2